

Rutin/checklista vid förskrivning av drivaggregat som individuellt hjälpmedel

Förskrivningen av drivaggregat görs på brukaren av rullstolen. Obs! kriterier finns för den närstående, se regelverk.

- Förskrivaren skickar det medicinska underlaget tillsammans med blankett förskrivning/beställning och rullstolsspecifikation till drivaggregatsansvarig konsulent på Hjälpmedelscentralen.
- Leverans sker med hjälpmedelscentralens chaufför eller turbil.
- Förskrivaren ansvarar för att instruera den närstående om användning och skötsel av drivaggregatet.
Informationsmapp med 2 exemplar av låneförbindelser skickas till förskrivaren eller bifogas med rullstolen. Signerad låneförbindelse skickas tillbaka till drivaggregatsansvarig konsulent. Brukaren behåller ett exemplar själv.
- Förskrivaren inleder körträning vid behov.

Drivaggregat monteras på följande rullstolar: Transit, Cross/Cross XL m vårdarbroms och Azalea Assist.

Följande drivaggregat finns i sortiment:

- Lille Viking 2015 Low bow, monteras på Transit- och Cross-stolar.
- E-walk, monteras på Transit
- ViaMobil V25, monteras på Azalea Assist

För kännedom:

Körbygel och hälband monteras alltid på rullstol Transit och Cross.

På Cross-stolar monteras även Transits länkhjul och länkhjulsgafflar för bättre hållbarhet. Detta registreras av Hjälpmedelscentralen.

Användning och skötsel av drivaggregat beskrivs i den bruksanvisning som medföljer vid leveransen, se leverantörens hemsida.

Om förskrivaren har behov av information från HMC, finns möjlighet att boka tid hos tekniker/konsulent på Hjälpmedelscentralen eller hjälpmedelsfilialerna. Se nedanstående lista på personer som kan kontaktas.

Kontaktpersoner på hjälpmedelscentralen:

Robert Törnstrand	0771 – 405 406
Niklas Lundqvist	0771 – 405 406
Cecilia Axelsson	016 – 10 46 69

HJÄLPMEDELSCENTRALEN I ESKILSTUNA

Adress: Hjälpmedelscentralen, Fraktgatan 5, 633 46 Eskilstuna

Tel: 0771 – 405 406

e-post: hmc@regionsormland.se

Checklista vid förskrivning av drivaggregat (individuellt ärende)

Före förskrivning

- ☐ Kriterierna är uppfyllda och läkarutlåtande finns
- ☐ Lämplig förvaring finns enligt Hjälpmedelscentralens anvisningar (låsbart utrymme, minst + 5 grader, el-uttag, ej våtutrymme)
- ☐ Närmiljön lämpar sig för att framföra drivaggregat
Drivaggregat är avsett för begränsad utomhusanvändning och har begränsningar till exempel vid ojämnt underlag, höga kanter, backe. (Se bruksanvisning)
- ☐ Brukaren har fått information om försäkring, egenavgift, körträning och ansvar, se sid 4

Vid utprovning/leverans

- ☐ Informerat om användning, skötsel och laddning av drivaggregatet, se bruksanvisning
- ☐ Gått igenom informationsmapp och låneförbindelse (ett påskrivet exemplar har skickats till drivaggregatsansvarig konsulent)
- ☐ Provat att drivaggregatet fungerar i närmiljön
- ☐ Körträning

Medicinska uppgifter inför förskrivning av vårdarstyrt drivaggregat

(fylls i av läkare)

För att få ett vårdarstyrt drivaggregat förskrivet så behöver Läkare intyga att det föreligger en medicinsk verifierad och bestående diagnos **hos personen som ska skjuta på rullstolen**. Symptomen ska vara av den grad att personen har stora svårigheter att skjuta på rullstolen av egen kraft

Namn på person som ska bli körd i rullstolen

Personnummer

--	--

Namn på person som ska skjuta på rullstolen

Personnummer

--	--

Diagnos på person som ska skjuta på rullstolen

--

Enligt min bedömning uppfylls kriterierna för drivaggregat

Datum

Läkarens underskrift

Namnförtydligande

Befattning

Tjänsteställe

Telefonnummer

--	--

OBS! Ifyllt dokument återsänds till förskrivaren

Ansvarig förskrivare (fylls i av förskrivaren)

Adress

--

HJÄLPMEDELSCENTRALEN I ESKILSTUNA

Adress: Hjälpmedelscentralen, Fraktgatan 5, 633 46 Eskilstuna

Tel: 0771 – 405 406

e-post: hmc@regionsormland.se

INFORMATION TILL BRUKARE AV DRIVAGGREGAT

FÖRSÄKRINGAR

Regionen äger hjälpmedlet och lånar ut det till brukaren. Regionen ansvarar inte för framförandet av hjälpmedlet, vare sig beträffande brukaren eller tredje man. Eldrivna rullstolar faller under bestämmelserna för cyklar och är inte trafikförsäkringspliktiga.

Hemförsäkringen är viktig. Brukaren rekommenderas att teckna en försäkring som gäller om man blir ersättningsskyldig på grund av oaktsamhet, exempelvis vid skada på annan person eller egendom vid framförandet av eldriven rullstol.

Ta kontakt med ditt försäkringsbolag för information.

Brukaren tecknar själv försäkring och betalar försäkringskostnaderna.

EGENAVGIFTER

Egenavgift 600 kr årligen. Gäller inte barn och ungdom till och med det år de fyller 19.

KÖRTRÄNING

Efter leverans inleds vid behov en träningsperiod tillsammans med förskrivare.

Den närstående ska kunna framföra den eldrivna vårdarmanövrerade rullstolen/drivaggregatet på ett säkert sätt, utan att utsätta sig själv eller andra för fara.

ANSVAR

Närstående/brukaren ansvarar för att ladda batterierna, rengöring samt att förvara stolen på anvisad plats. Vid stopp ansvarar närstående/brukaren för att få stolen till en lämplig skyddad förvaringsplats, i väntan på reparation.