



## Exportera/Säkerhetskopiera användare i TD Snap


1. Se till att hårdvaran (t.ex. SC Tablet, TD I-110, I-13) är uppkopplad mot internet.
2. Gå in i appen TD Snap.
3. Tryck på Kugghjulet  för att komma in i redigeringsläget.

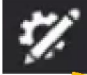


4. Gå in under fliken Användare och kontrollera att du är inloggad på ditt myTobiiDynavox-konto. Om du inte har något konto, kontakta din förskrivare.

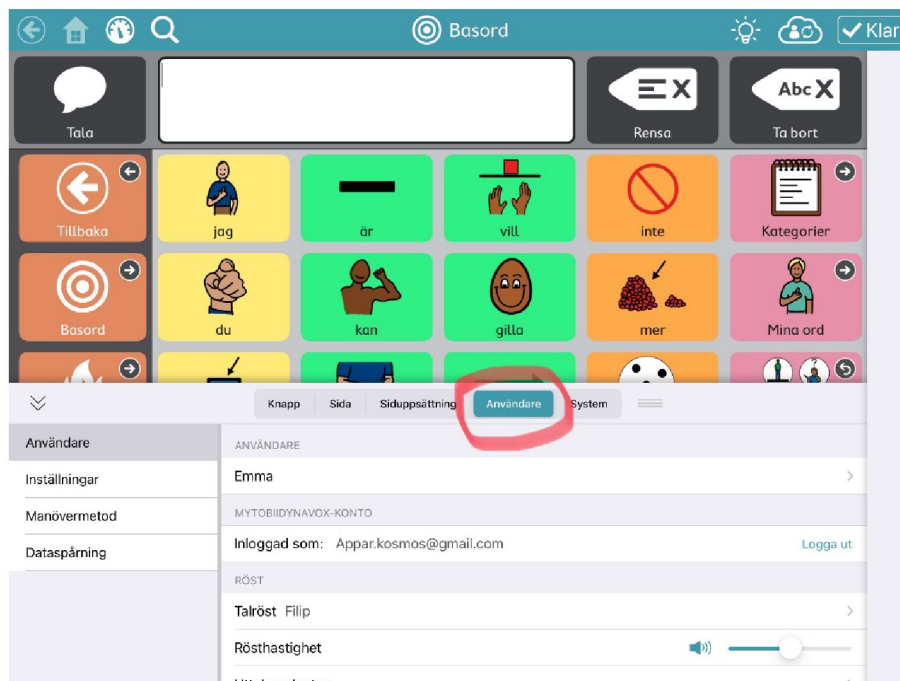


5. Tryck på Användare.

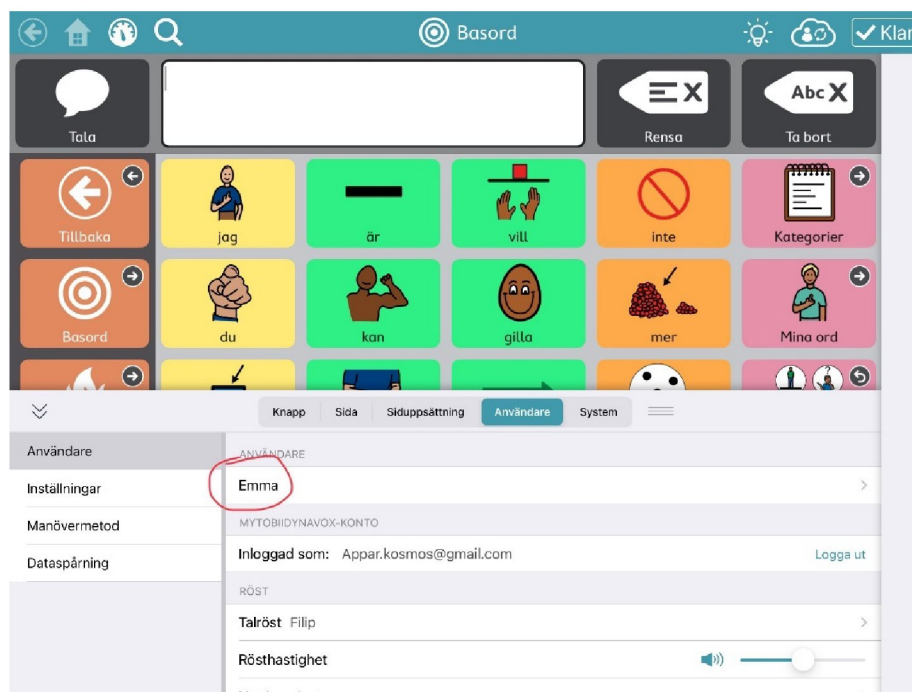


6. Här kommer en lista med de användare som skapats i TD Snap (oftast bara en).

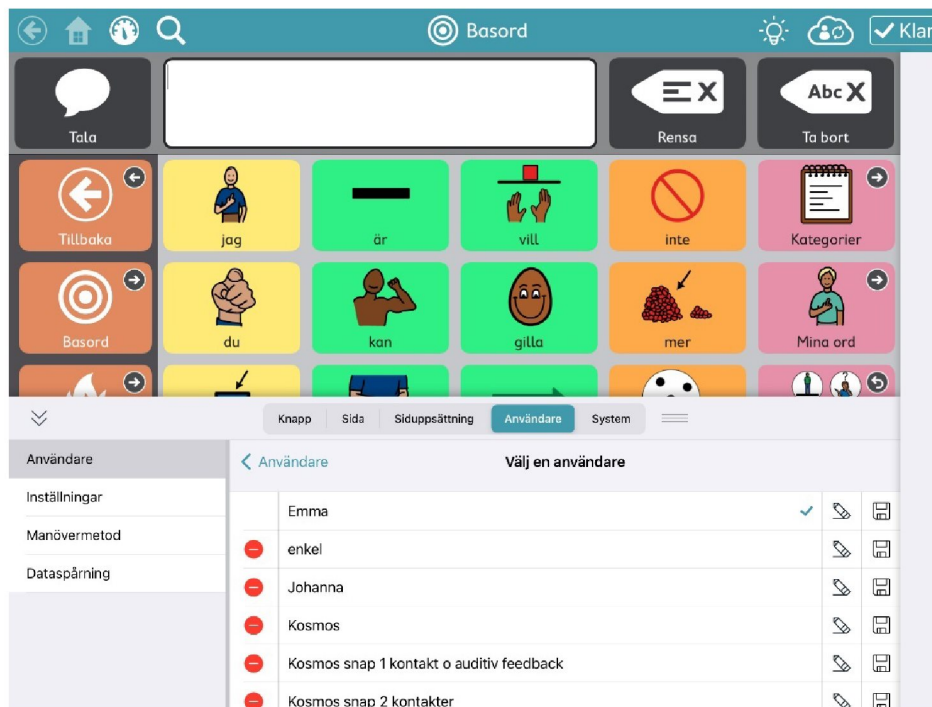


7. Tryck på Sparaikonen (disketten). Välj Säkerhetskopiera till myTobiiDynavox.

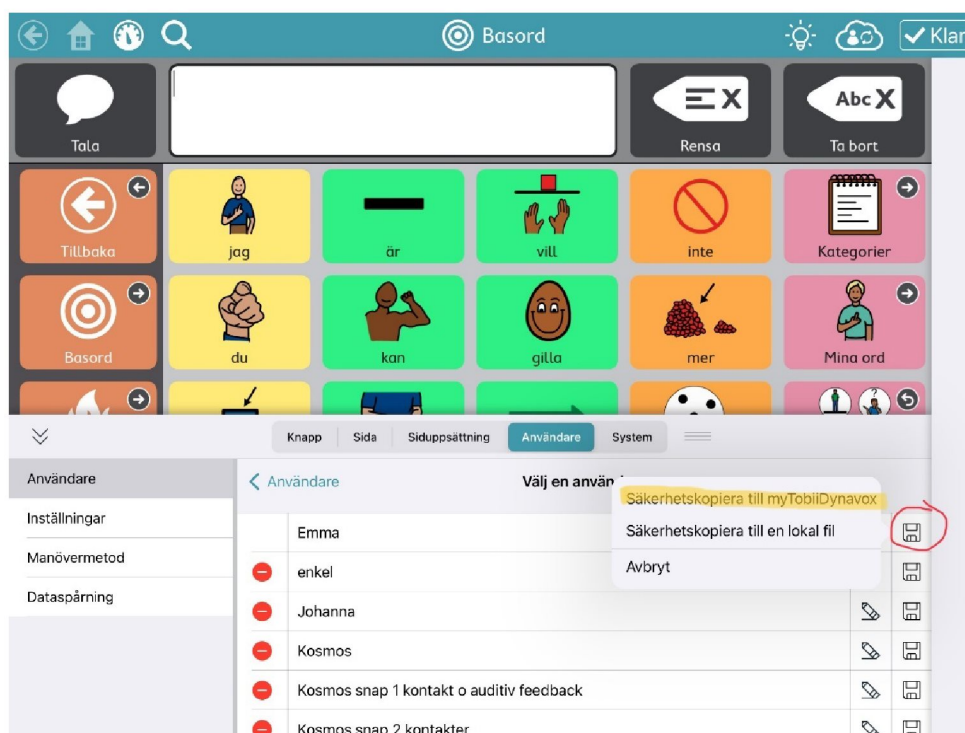

8. Namnge säkerhetskopian. Ett tips är att använda namnet och dagens datum.

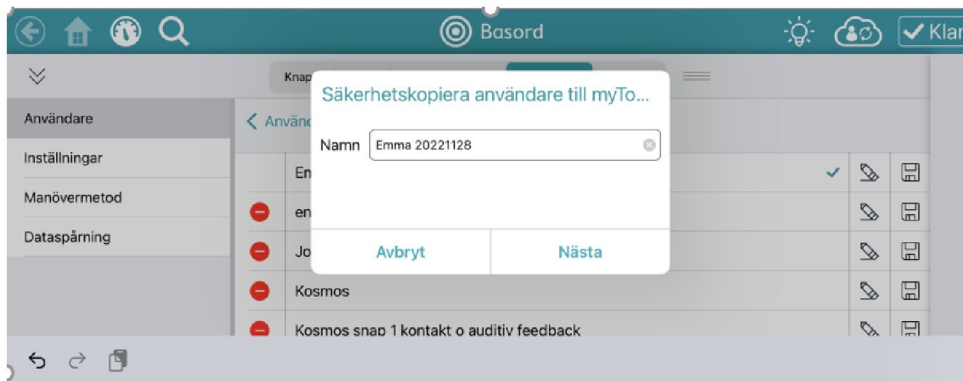

9. Du har nu säkerhetskopierat/exporterat din användare.

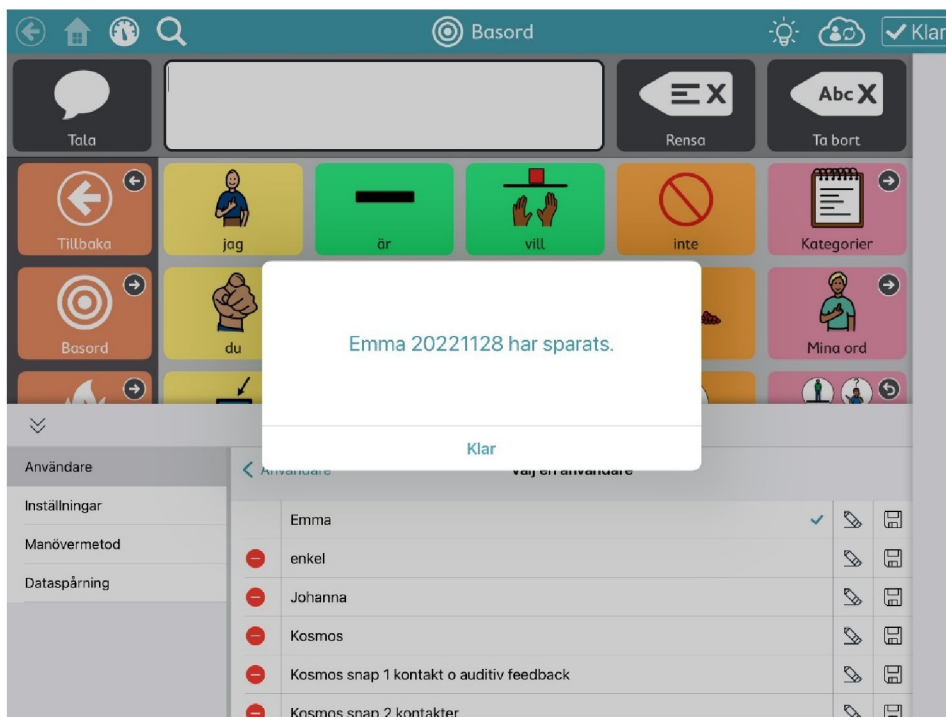

10. Tryck Klar. Tryck sedan Klar uppe i högra hörnet. Nu kan TD Snap börja användas igen. Bra jobbat! 👍

