

Fläktassisterade andningsskydd – rengöring, vårdhygieniska riktlinjer

Syfte

Denna riktlinje är endast en rengöringsrutin av det fläktassisterade andningsskyddet. För användningsinstruktioner av skärm och fläkt var god se [SR 570 – face shield](#) och [SR 500](#). Visuellt kontroll samt funktionskontroll görs **före och efter varje** användning, enligt tillverkarens anvisning.

Bakgrund

Arbetsgivaren ska se till att personlig skyddsutrustning såsom andningsskydd är individuellt utprovad. Från och med januari 2025 krävs så kallat tillpassningstest för tätsittande andningsskydd innan de används enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2023:11.

Om tillpassningstest för andningsskydd (FFP2/FFP3) inte kan genomföras med godkänt resultat, exempelvis på grund av skäggväxt eller att andningsskyddet inte sluter tätt mot ansiktet utifrån ansiktsform, ska medarbetaren i stället använda fläktassisterat andningsskydd enligt nedan.

Användningsområde

Andningsskydd ska användas vid vård av patienter med misstänkt/bekräftad luftburen smitta som till exempel smittsam lungtuberkulos eller mässling. Andningsskydd kan också övervägas vid vård av patienter med misstänkt/bekräftad akut virusorsakad luftvägsinfektion OCH ökad risk för smittspridning exempelvis vid lång exponeringstid hos kraftigt hostande patient eller vid medicinska åtgärder såsom intubation och bronkoskopi.

OBS! I normalfallet används enbart munskydd IIR (samt visir/glasögon) vid vård av patient med misstänkt/bekräftad akut virusorsakad luftvägsinfektion.



Introduktion till skärm SR 570 och fläkt SR 500

Skärm SR 570

Skärm SR 570 tillsammans med den batteridrivna fläkten SR 500 och godkända filter ingår i Sundströms fläktassisterade andningsskyddssystem. Skärmens andningsslang ansluts till den filterförsedda fläkten. Övertrycket som bildas i skärmen förhindrar partiklar och andra föroreningar att komma in i skärmen. Skärmen SR 570 **är personlig** och ska rengöras enligt rutin efter **VARJE** användning.

OBS! Vid första användning ta bort siktskiva från skärm



Fläkt SR 500

SR 500 är en batteridrivna fläkt som tillsammans med partikelfilter och en godkänd ansiktsdel ingår i Sundströms fläktassisterade andningsskyddssystem. Fläkten kan användas av flera medarbetare.


Slangskydd

Plastöverdrag används för att skydda slangen mellan fläkt och skärm mot yttre kontamination.


Rengöringsinstruktioner

Rengöring Skärm SR 570

- Efter varje användning rengörs skärmen utvändigt med +45 IPA (ytdeinfektionsmedel med tensid).
- Ta loss ansiktstätningen från skärmen genom att lossa hakarna från huvudställningen och därefter dra försiktigt loss den. Rengör ansiktstätningen med +45 IPA (ytdeinfektionsmedel med tensid).

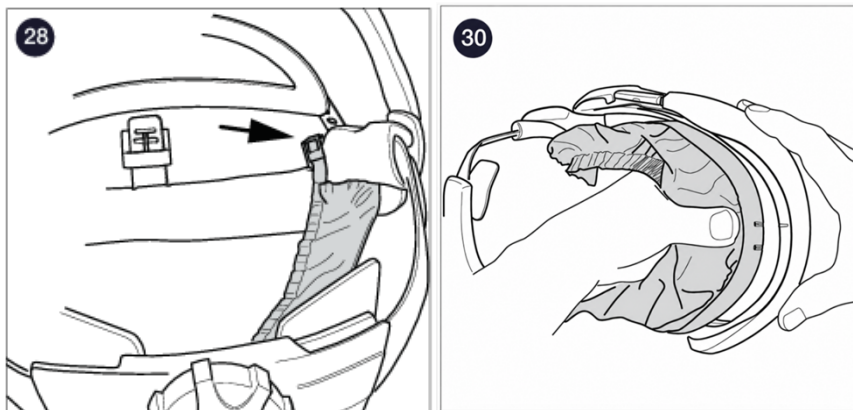

- Låt ytdeinfektionen torka, montera därefter tillbaka ansiktstätningen.
- Rengör utandningsmembranet och ventilsåtet vid behov. Utandningsmembranet ska bytas årligen enligt tillverkarens anvisning.

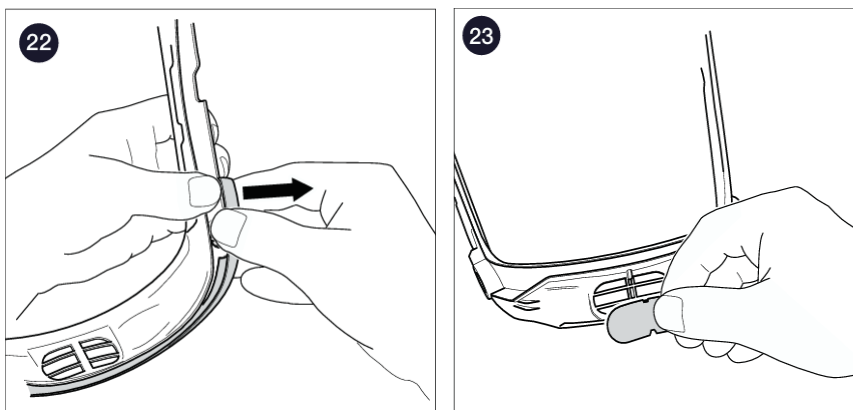

- Tätning huvudställning, ansiktstätning och svettband byts vid behov. Följ tillverkarens anvisningar.

Rengöring Fläkt SR 500

- Efter varje användning rengörs fläkten utvändigt med +45 IPA (ytdesinfektionsmedel med tensid).
- Använd **alltid** engångsplastförkläde över bältet, efter användning desinfekteras bältet med +45 IPA (ytdesinfektionsmedel med tensid).
- Fläktpackningar, förfilter samt partikelfilter byts vid behov, eller enligt tillverkarens anvisningar.

Slangskydd

- Slangskydd ska alltid användas.
- Byt slangskydd efter varje arbetspass eller vid behov om synlig nedsmutsning.